

BEDIENUNGSANLEITUNG Evacusafe Rettungsstuhl Excel



1. Der Stuhl sollte dort stehen, wo er gebraucht wird. Hängend oder an der Wand lehrend, ist er von Weitem gut sichtbar.



2. Entfernen Sie die Schutzhülle und halten Sie den Stuhl aufrecht.



3. Durch drücken des roten Fußhebels entriegeln Sie die Bremsen, wie im Foto gezeigt.



4. Öffnen Sie den Gurt und bringen Sie den Stuhl in eine Sitzposition, die Schienen werden dadurch arretiert. Zur Überprüfung drücken Sie die Strebe zwischen den beiden roten Verriegelungen herunter.



5. Öffnen Sie die Fußstütze.



6. Setzen Sie die zu rettende Person in den Stuhl, schließen den Gurt und bringen die Armstützen nach vorne.



BREMSEN LÖSEN!
7. Öffnen Sie die Bremsen durch heruntertreten der roten Fußplatte.



8. Machen Sie sich auf den Weg zum Notausgang..



9. Dort angekommen, öffnen Sie die Rückenverriegelung. Nun ziehen Sie den Griff hoch und verriegeln wieder. Der Griff wird mit einem Klicken sicher einrasten.



10. Greifen Sie nun oben am Griff und kippen den Stuhl nach hinten. Sie können dazu auf die grüne Schienenstrebe treten.



11. Manövrieren Sie den Stuhl auf die ersten beiden Stufen und vergewissern Sie sich, dass die Schienen vollen Kontakt zu den Stufen haben.



12. Zum Hinabgleiten drücken Sie den Griff in Richtung Ihrer Füße.



13. An einem Treppenansatz nutzen Sie alle 4 Räder, bis zu den nächsten Stufen.



LAGERPOSITION:
14. Verriegeln Sie die Bremsen.



15. Öffnen Sie die rote Verriegelung, Griff langsam herunter lassen und Verriegelung schließen. Griff hochziehen – fest verriegelt. Gurt durch und über Griff ziehen.



16. Armstützen zurück und gleichzeitig Stuhl Rücken nach vorne drücken und rot markierte Strebe zurück ziehen. Dann Stuhl zusammenfallen.



17. Gurt durch Fußstütze führen und einrasten. Der Rettungsstuhl kann jetzt wieder an seinen Platz.