




1. Nehmen Sie den Stuhl von Wand und entfernen Sie die Abdeckung.



2. Öffnen Sie den Sicherheitsgurt.




3. Öffnen Sie den Rücken und sichern Sie ihn mit Hilfe der Bolzen.

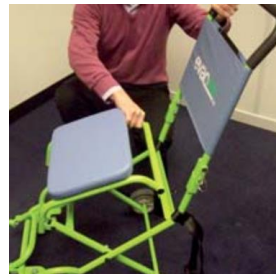


4. Halten Sie den Rücken und bringen den Sitz in Position.



5. Klappen Sie die Fußstütze auf.

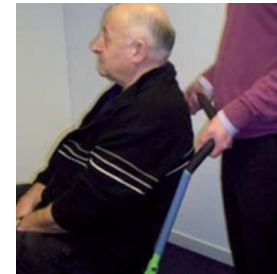

6. Nachdem die zu rettende Person Platz genommen hat, schließen Sie den Sicherheitsgurt.

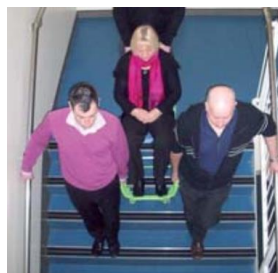

DER TRANSITSTUHL MUSS ZUM TRAGEN MIT MIND. 2 UND KANN MIT BIS ZU 4 PERSONEN BEDIENT WERDEN.


7. Eine Person übernimmt das Kommando und gibt die Anweisung zum gleichzeitigen Anheben des Transitstuhls.




LAGERPOSITION:
8. Klappen Sie die Fußstütze zurück.



9. Halten Sie den Rücken und nehmen Sie den Sitz aus der Halterung

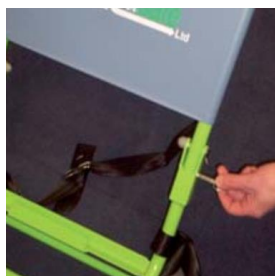

10. Entfernen Sie die Sicherungsbolzen ...

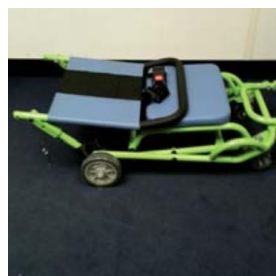

... und klappen Sie den Rücken zu.



11. Schließen Sie den Sicherheitsgurt um den Transitstuhl 4R.



12. Mit der Abdeckhülle platzieren Sie den Transitstuhl an seiner Lagerposition.